



UltraFIX


creme fixador de dentaduras

INSTRUÇÃO DE USO

USO TÓPICO

ULTRAFIX é um creme para fixação de próteses dentárias. Sua formulação proporciona fixação durante todo o dia, além de ser livre de corantes e sem sabor, preservando o paladar durante a alimentação. O uso do produto permite uma mastigação eficiente, melhora na dicção e prevenção de perda/quebra da prótese.

COMPOSIÇÃO



Copolímero de PVM/MA (GANTREZ MS – 955), carmelose sódica, petrolato sódico e óleo mineral.


INDICAÇÃO

Indicado para fixação de próteses dentárias.

FUNDAMENTOS DO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO:

O produto contém na sua formulação, o sal de sódio e cálcio de éter de vinil metílico/copolímero de anidrido maleico, aniônico, possuindo propriedades de bioadesividade, ligante, biocompatível, não sendo tóxico, não irritante, que confere ao produto uma característica de adesividade, proporcionando maior firmeza na fixação de próteses dentárias (dentaduras), permitindo maior confiança e segurança ao falar, rir e comer.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.
 - Alguns indivíduos podem ser sensíveis ou alérgicos a este produto. Caso verifique reação alérgica ou desconforto, pare de usar o produto imediatamente.
 - Se ocorrer irritação durante o uso, pare de usar e consulte o seu dentista.
 - Em caso de ingestão acidental, procure imediatamente um médico.
 - Quando utilizado pela primeira vez, aplique uma pequena quantidade de produto, colocando mais se necessário. O excesso de adesivo pode causar transbordamento. Neste caso, aplique menos na próxima vez. Podem ser necessárias algumas tentativas para ajustar a quantidade adequada para a sua prótese. Aplique um vez ao dia para adesão segura. Se você precisar aplicar mais de uma vez ao dia, procure orientação do seu dentista.
 - A ingestão de pequenas quantidades do produto, se usado conforme recomendado, pode ocorrer e não apresenta riscos.
 - Para evitar entupimentos do tubo, mantenha a tampa e o bico dosador secos.
 - ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM ZINCO.
 - ESTE PRODUTO MANTÉM A PRÓTESE FIXADA ATÉ 12 HORAS.
 - A PRÓTESE FIXADA COM ESTE PRODUTO, AJUDA A BLOQUEAR PARTÍCULAS DE ALIMENTO.
- 

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Durante armazenamento e transporte, ULTRAFIX deve ser mantido na sua embalagem original e conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE ULTRAFIX

Bisnaga plástica contendo 40 g e 68 g.

COMO APLICAR O PRODUTO (MODO DE USAR):

1. Lave e seque a prótese dental.
2. Aplique ULTRAFIX em pequenas tiras, não muito perto das bordas, conforme ilustração.
3. Enxágue sua boca antes de colocar a prótese.






4. Coloque a prótese corretamente na boca, pressione firmemente e morda por alguns segundos para maior segurança.



SUPERIOR

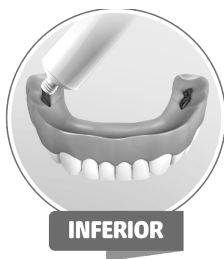

INFERIOR



PARCIAL

REMOÇÃO

1. Faça um bochecho com água.
2. Remova lentamente a prótese com movimentos ondulatórios.
3. Remova os resíduos do produto da prótese e da boca com auxílio de água morna e uma escova macia.
4. Se for o caso, guarde a prótese em recipiente e local adequado para maior segurança.

**O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTÁ IMPRESSO NA BISNAGA
E NA EMBALAGEM EXTERNA (CARTUCHO).
APÓS ESTE PRAZO, NÃO USE O PRODUTO.**

Registro MS nº: 80424149001

Lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho

PRODUTO FABRICADO POR:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90 – Centro
Embu-Guaçu – SP CEP: 06900-000 - SAC 0800 11 1559
CNPJ: 60.665.981/0001-18 Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas – CRF SP Nº 49.136



4013136 - 250 x 150 mm - Laetus 667

